


## VENESTRIPPER TIL ENGANGSBRUG DISPOSABLE VEIN STRIPPER

### 1.- Indføring af strip-kablet / Insertion of Cable.


Begge ender af strip-kablet kan indføres distalt eller proximalt i venen.  
*Either end of the cable may be inserted into either end of the vein.*

### 2.-Montering af oliven / Olive Assembly.

En oliven med passende diameter samt håndtaget monteres efter endt indføring af strip-kablet.  
*The olive with the appropriate diameter and handle are to be placed on cable after it is fully inserted.*

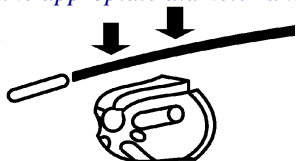


1. Læg strip-kablet i udfræsningen/åbningen på oliven.  
*Insert cable into slot and snap until clicks.*

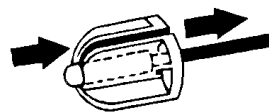

2. Træk i strip-kablet indtil den monterede oliven sidder fast.  
*Draw cable into olive until seats.*

### 2.- Model. Invagination: Central Diábolo /Central Diabolo.

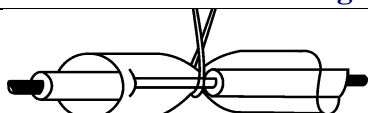


1. Ved invaginationstripping, anvend den centrale diabolo.  
*Endo stripping: Use the central diabolo.*




2. Ø/6mm oliven anv. ved central diabolo.  
*6mm dia. olive on central diabolo.*

### 3.- Håndtag monteres / Handle Assembly. Vein Stripping.

Træk forsigtigt i håndtaget for at fjerne venen. / *Pull softly the handle side to remove the vein.*

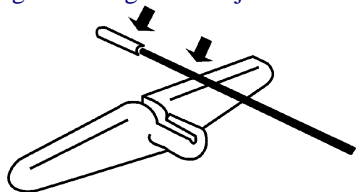

1. Læg strip-kablet i udfræsningen/åbningen på håndtaget.  
*Insert cable into slot and snap in position.*

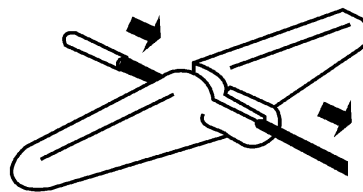

2. Træk i strip-kablet indtil håndtaget sidder fast.  
*Draw cable into handle until seats.*

Ved spørgsmål eller ønske om yderligere vejledning, kontakt da venligst :